

① 顯示螢幕 ③ 秤面 ⑤ 腳座
② 設定鍵 ④ 電池蓋

⚠ 請保持手指乾燥，並勿帶著手套觸控按鈕。請勿將金屬靠近按鈕。

目錄


- | | |
|-----------|------------|
| 1. 安全須知 | 7. 操作方式 |
| 2. 產品規格 | 7-A 體重模式 |
| 3. 電池安裝 | 7-B BMI 模式 |
| 4. 產品自我校正 | 7-C 目標體重模式 |
| 5. 錯誤訊息列表 | 7-D 母嬰模式 |
| 6. 存放與維護 | 7-E 調整音量 |
| | 8. 記憶模式 |

📖 感謝您購買 oserio 體重管理產品，請在開始使用產品前，詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！


2. 產品規格

型號	oserio 多功能語音秤 MEG-213		
電池	4顆3號電池	產品重量	2 kg
設定項目	年齡：10 ~ 80歲、性別：男/女、身高：100 ~ 199.5cm		
產品尺寸	330(d) x 330(w) x 30(h) mm 顯示器 92(d) x 45(w) mm		
適用環境	溫度 5℃ ~ 40℃ / 濕度30% ~ 95% RH		
保存環境	溫度-20℃ ~ 60℃ / 濕度10% ~ 95% RH		
秤重準確度	5 ~ 180kg (±1%)		
顯示項目	BMI範圍：≤18.4(偏瘦) / 18.5 ~ 23.9(正常) 24 ~ 26.9(偏胖) / ≥27(超胖) 記憶：體重50組		
附件	產品說明書、保固卡		

3. 電池安裝

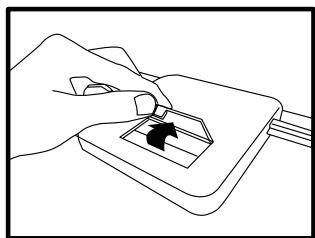

打開電池蓋

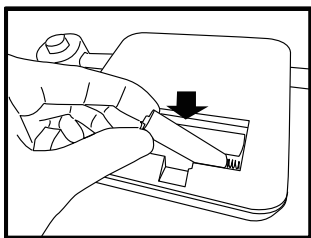


請放入四顆三號電池

⚠ 個人資料及記憶的內容，不會因為更換電池而刪除。
請確保電池正反極安裝正確。

1. 安全須知

- 請放在嬰幼兒接觸不到的地方，避免受傷。
- 請勿在產品上跳躍，避免重心不穩跌倒受傷。
- 勿踩踏產品邊緣或顯示螢幕上，避免影響測量或跌倒。
- 行動不便或年長者，請在家人陪同下使用。
- 請勿自行拆卸、修改或改裝產品。
- 請使用指定電池。請對準+-極，正確裝入電池。
- 長時間未使用(三個月以上)，請將電池取出。
- 開機後若產品螢幕未顯示，請檢查電池是否正確安裝或已耗盡。
- 為延長產品壽命，請勿同時混用新舊電池、或品牌、或種類不同的電池。
- 請勿在雙腳潮溼或產品表面潮濕時，進行測量。
- 請勿將產品放置在潮濕、陽光直射、或空調出風口或接近火源的地方，以免發生故障。
- 本產品為精密儀器，請勿重摔、震動或強力撞擊，以免發生故障。
- 清除水汙垢時，請勿使用苯、汽油、塗料稀釋劑，酒精或其他揮發性溶劑擦拭產品，以免產品變色或故障。
- 請勿將產品放置在地毯或軟墊等不平整的地板上，會導致量測數值不正確。
- 脫鞋量測重量更精確。
- 請依照國內電子設備廢棄物規定，回收廢舊電池。
- 請勿在產品附近使用行動電話。

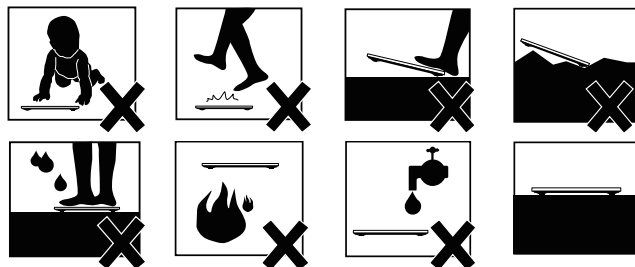

4. 產品自我校正

首次(或重新)安裝電池以及移動產品後，可能會造成產品秤重基準點有所誤差，需以下述方式重新校正，以確保測量結果正確，完成後，方可上秤測量。

- 將產品放置於地面
- 踩上秤盤 (期間不需等待重量鎖定)
- 步下秤盤
- 畫面熄滅
畫面自動關機即完成校正


5. 錯誤訊息列表

LO	Err	Err	Err
低電量提醒 需更換新電池	超載或秤重不穩定 請在量測中保持不動	體水份數據 超出產品規格	EEPROM數據無法儲存 請重新設定或聯絡客服

⚠ 當顯示錯誤訊息時，語音將不會播出量測結果

6. 存放與維護

- 將產品放置於乾燥的環境
- 使用酒精擦布擦拭產品表面
- 產品刮傷或水滲透進產品，將影響產品使用壽命
- 請不要站在產品邊緣或是顯示螢幕上
- 請避免陽光直射產品

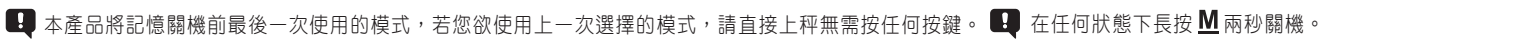

7-A體重模式

